



### Jos katetri tukkeutuu 1–3 viikon kuluessa

- Käytä Uro-Tainer® Solutio R -huuhdetta joka päivä tai joka toinen päivä vähintään kahden viikon ajan
- Vähennä tämän jälkeen käyttökertoja 2–3 kertaan viikossa, jos mahdollista
- Harkitse mahdollista huuhteen vaihtoa Uro-Tainer® Suby G:hen

### Jos katetri tukkeutuu neljän viikon välein tai harvemmin

- Aloita käyttämällä Uro-Tainer® Suby G -huuhdetta kahdesti viikossa

### Akuutin katetriperäisen infektion yhteydessä

- Huuhtelee Uro-Tainer® Polyheksanidi -huuhteella paikallishoitona yhden kerran vuorokaudessa viikon ajan ja ylläpitohoitona 1–2 kertaa viikossa

**Älä käytä Uro-Tainer® Solutio R ja Suby G -sitruunahappohuuhteita** mikäli ilmenee yliherkkyyttä (allergiaa) jollekin huuhteen ainesosalle, virtsatieinfektion tai muiden sellaisten urogenitaalialueen sairauksien yhteydessä, joissa voi esiintyä hematuriaa (verivirtsaisuutta), useamman päivän aikana virtsarakko- tai virtsatieleikkauksen jälkeen.

**Älä käytä Uro-Tainer® Polyheksanidia** mikäli ilmenee yliherkkyyttä (allergiaa) polyheksanidille, klooriheksidiinille tai huuhteen lisäaineelle, virtsatieinfektion tai muiden sellaisten urogenitaalialueen sairauksien yhteydessä, joissa voi esiintyä hematuriaa (verivirtsaisuutta).

### Tilaustiedot

Sairaalat ja apteekit: asiakaspalvelu@tamro.com, puh. 020 445 3330 | Yksityisasiakkaat: www.edis.fi, puh. 040 022 9464

Tuotenimi	Tuotenumero	Kpl / Itk
Uro-Tainer® Suby G	FB99839	10
Uro-Tainer® Solutio R	FB99841	10
Uro-Tainer® PHMB 0,02 %	FB99965	10

