

# Mini-Spike® 2 / Mini-Spike® 2 Filter




1. Poista lääkepulloa suojakorkki ja desinfioi tulppa sairaalan hygienia-suositusten mukaisesti.



a)

2.a Poista Mini-Spike® 2:n pistokärjen suojus. Työnnä pistokärki lääkepulloon pitämällä kiinni Mini-Spike® 2:n tartuntalevystä.

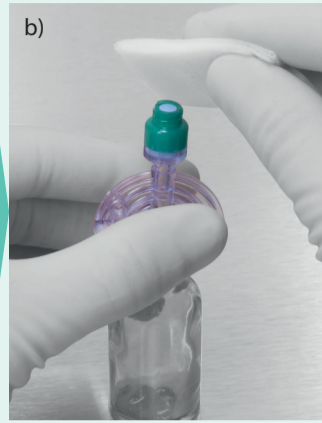

b)

2.b Desinfioi venttiili ennen käyttöä sairaalan hygienia-suositusten mukaisesti esim. käyttämällä SwabCap® desinfektio-korkkia.




3. Yhdistä kantaja-ainetta sisältävä ruisku venttiiliin lääkepulloa ollessa pystyasennossa.



4. Injektoi kantaja-aine.

**Tärkeää:** Kantaja-aine tulee injektoida ruiskusta pulloon ainoastaan pystyasennossa.

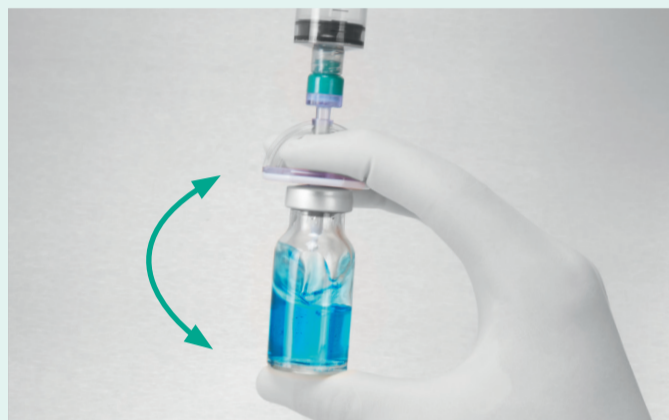

5. Sekoita lääkepulloa valmistajan suositusten mukaisesti varmistaaksesi, että liuos on kunnolla liennut.




a)

6.a Käännä pullo ylösalaisin lääkkeenvetoa varten.



b)

6.b Poista ilma ruiskusta ja vedä lääkeaine ruiskuun.

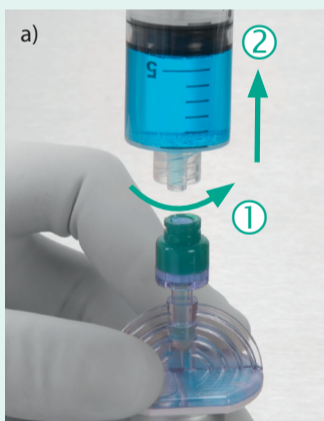


a)



b)

7.a Irrota ruisku venttiilistä lääkepulloa ollessa pystyasennossa.  
7.b Mikäli lääkepulloa käytetään useamman kerran, desinfioi venttiililiitäntä sairaalan hygienia-suositusten mukaisesti.

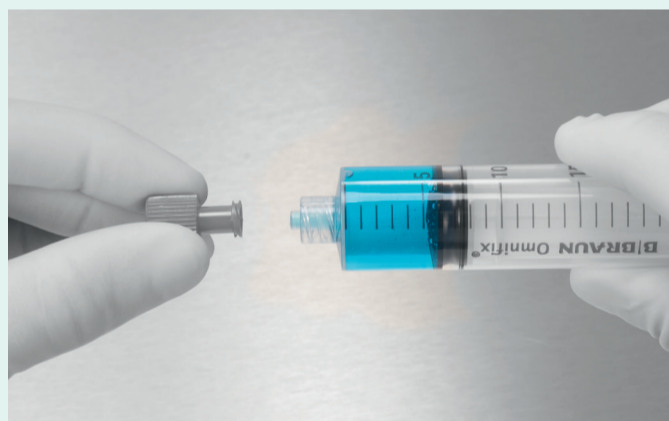


8. Aseta ruiskuun suojus kuljetuksen valmistelua varten.



9)

9. Useamman käyttökerran pullot tulee säilyttää pystyasennossa.

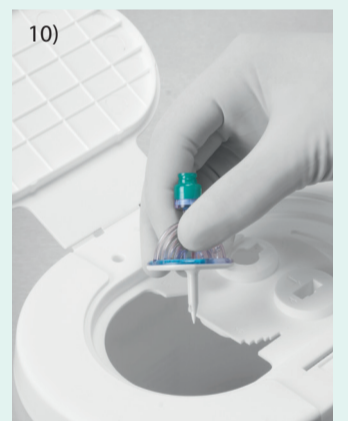

10)

10. Hävittäminen sairaalan ohjeiden mukaisesti.



Mini-Spike® 2

0.45 µm  
Air Filter



Mini-Spike® 2 Filter

5 µm  
Fluid Filter

0.45 µm  
Air Filter

## Turvallisuushyödyt

- Pienentää kemiallisen ja mikrobiologisen kontaminaation riskiä
- Pienentää partikkelikontaminaation riskiä
- Estää neulanpistotapaturmia
- Kätevä, neulaton käsittely

[www.safeinfusiontherapy.com](http://www.safeinfusiontherapy.com)

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE